

Изделия медицинские зондирующие, бужирующие: катетер пупочный

Артикулы: S10200005, S10200006, S10200008

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Поливинилхлорид (ПВХ)
Допустимые длины: 40 см.
Допустимые размеры: 5, 6, 8 Ch
- изделие не содержит DEHP

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для катетеризации пупочной вены новорожденных с целью проведения инфузионно - трансфузионной терапии или парентерального питания.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- врачи и медицинский персонал, имеющие соответствующую квалификацию и проинструктированные по обращению с медицинским изделием.
Медицинское изделие должно применяться в лечебно-профилактических учреждениях с соблюдением надлежащих правил асептики и антисептики.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- проверить целостность упаковки и срок годности изделия
- надеть перчатки после предварительной обработки рук растворами антисептиков
- аккуратно вскрыть упаковку, извлечь катетер, не нарушая его стерильность
- после обработки растворами антисептика и перерезания пуповины, аккуратно ввести пупочный катетер в пупочную вену на необходимую глубину
- закрепить катетер относительно пуповины
- обработать культю пуповины растворами антисептика
- сразу после проведения манипуляций, катетер необходимо удалить*
- обработать и утилизировать катетер в установленном порядке

* При невозможности проведения инфузионной терапии через периферические вены, катетер продвигается глубже и фиксируется.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- для однократного применения
- не использовать при нарушении целостности упаковки
- срок годности 5 лет с даты изготовления
- хранить при температуре от -30 до +45 С
- обработка и утилизация катетера в установленном порядке

“ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ”

Изделие следует использовать в стерильных условиях, однократно и для одного пациента. Очистка или повторная стерилизация исключена. Многократное использование одноразовых изделий содержит потенциальные риски для пациента и персонала. Ухудшение свойств материала и нарушение стерильности, вызванное подобным повторным использованием, может привести к заболеванию, травме или смерти пациента.

“ПРОДУКТ НЕ СОДЕРЖИТ ФТАЛАТЫ (DEHP)”

Этот продукт не содержит пластификатор (DEHP).

СТЕРИЛИЗАЦИЯ:

- оксид этилена

