

## Изделия медицинские для инфузионной терапии: краник для инфузии

Артикулы: S7900B003.

### ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Полипропилен(ПП), поликарбонат, полиэтилен  
Продукт не содержит фталаты (DEHP-free)  
Допустимый цвет: синий  
Допустимое давление: 4,5 bar

### НАЗНАЧЕНИЕ:

- внутривенное введение растворов, парентеральное питание, введение лекарств
- переливание крови и компонентов крови
- длительная инфузионная терапия

### ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- врачи и медицинский персонал, имеющие соответствующую квалификацию и проинструктированные по обращению с медицинским изделием.

Медицинское изделие должно применяться в лечебно-профилактических учреждениях с соблюдением надлежащих правил асептики и антисептики.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- проверить целостность упаковки и срок годности изделия
- аккуратно вскрыть упаковку, извлечь краник, не нарушая его стерильность
- 3-х ходовой краник может быть подключен к одной или двум инфузионным системам одновременно
- присоединить к линиям краника (при закрытом поворотном переключателе краника) одну или две инфузионные системы
- при открытом поворотном переключателе, выпустить пузырьки воздуха из инфузионных систем
- закрыть поворотный переключатель
- снять заглушку с замка Луер Лок краника и подсоединить male – часть краника к female – части внутривенной канюли, венепункционной линии
- открыть поворотный переключатель краника, начать инфузию
- обработать и утилизировать краник в установленном порядке

### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- перед использованием изделия, читать инструкцию
- для однократного применения, не чистить и не подвергать повторной стерилизации
- не использовать при нарушении целостности упаковки
- если упаковка не имеет повреждений и не вскрыта, то гарантируется, что изделие – не токсично, стерильно, не содержит пирогены
- 3-х ходовой краник использовать сразу после открытия стерильной упаковки
- после применения обеспечить надлежащее удаление и утилизацию
- обработка и утилизация краника в установленном порядке
- срок годности 5 лет с даты изготовления
- хранить при температуре от -30 до +45 С, в сухом и прохладном месте



#### “ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ”

Изделие следует использовать в стерильных условиях, однократно и для одного пациента. Очистка или повторная стерилизация исключена. Многократное использование одноразовых изделий содержит потенциальные риски для пациента и персонала. Ухудшение свойств материала и нарушение стерильности, вызванное подобным повторным использованием, может привести к заболеванию, травме или смерти пациента.

CE  
0044

STERILE EO