

**Иглы инъекционные для анестезии acti-fine® в вариантах исполнения:
иглы инъекционные для анестезии спинальные acti-fine® spine-ject с
острием карандашного типа (Pencil Point) с/без интродьюсера**

Артикулы: S53P00290 – S53P27121

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Медицинская сталь, поликарбонат, полипропилен
Допустимые длины: 90 - 120 мм.
Допустимые размеры: 20 - 27 G

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначена для пункции спинального пространства с целью диагностики, забора спинномозговой жидкости, анестезии и лечения.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- врачи и медицинский персонал, имеющие соответствующую квалификацию и проинструктированные по обращению с медицинским изделием.

Медицинское изделие должно применяться в лечебно-профилактических учреждениях с соблюдением надлежащих правил асептики и антисептики.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- проверить целостность упаковки и срок годности изделия
- надеть перчатки после предварительной обработки рук растворами антисептиков
- аккуратно вскрыть упаковку, извлечь иглу, не нарушая ее стерильность
- провести антисептическую обработку пункционной зоны
- произвести местную анестезию кожи и подлежащих тканей пункционной зоны
- удалить защитный колпачок
- ввести спинальную иглу в спинальное пространство
- * игла вводится только с obturatorом
- после прокола твердой мозговой оболочки, вынуть obturator из спинальной иглы и подождать появления спинальной жидкости в прозрачном павильоне иглы
- * если спинальная жидкость не появляется, то необходимо с введенным обратно obturatorом поменять глубину постановки иглы
- провести запланированную процедуру, извлечь спинальную иглу
- закрыть место пункции стерильной салфеткой
- обработать и утилизировать иглу в соответствии с установленным порядком

ВАЖНО:

- не применять излишние усилия при введении иглы – возможно искривление иглы или поломка
- согнутая игла подлежит замене, выпрямлять ее запрещено
- при ощущении сопротивления при введении иглы или появления боли, следует приостановить манипуляцию и действовать в соответствии с медицинскими показаниями и методиками

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:

- | | |
|---|---------------------------------|
| - транзиторная неврологическая симптоматика | - постпункционная головная боль |
| - эпидуральная гематома или абсцесс | - пневмоцефалия |
| - нейротоксичность | - задержка мочи |
| - гипотония | - брадикардия |

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:

- использовать только квалифицированным медицинским персоналом
- для одноразового использования
- не использовать при нарушении целостности упаковки
- срок годности 5 лет с даты изготовления
- хранить при температуре от -30 до +45 С, в прохладном, сухом месте.
- обработка и утилизация иглы в соответствии с установленным порядком



“ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ”

Изделие следует использовать в стерильных условиях, однократно и для одного пациента. Очистка или повторная стерилизация исключена. Многократное использование одноразовых изделий содержит потенциальные риски для пациента и персонала. Ухудшение свойств материала и нарушение стерильности, вызванное подобным повторным использованием, может привести к заболеванию, травме или смерти пациента.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ:

- оксид этилена

