

**Иглы инъекционные для анестезии acti-fine® в вариантах исполнения:  
иглы инъекционные для анестезии спинальные acti-fine® spine-ject с  
острием Квинке с/без интродьюсера**

Артикулы: S53Q01870 – S53Q02791

**ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ:**

Медицинская сталь, поликарбонат, полипропилен  
Допустимые длины: 38 - 150 мм.  
Допустимые размеры: 18 - 27 G

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Предназначена для пункции спинального пространства с целью диагностики, забора спинномозговой жидкости, анестезии и лечения.

**ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

- врачи и медицинский персонал, имеющие соответствующую квалификацию и проинструктированные по обращению с медицинским изделием.

Медицинское изделие должно применяться в лечебно-профилактических учреждениях с соблюдением надлежащих правил асептики и антисептики.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**

- проверить целостность упаковки и срок годности изделия
- надеть перчатки после предварительной обработки рук растворами антисептиков
- аккуратно вскрыть упаковку, извлечь иглу, не нарушая ее стерильность
- провести антисептическую обработку пункционной зоны
- произвести местную анестезию кожи и подлежащих тканей пункционной зоны
- удалить защитный колпачок
- ввести спинальную иглу в спинальное пространство
- \*игла вводится только с obturatorом
- после прокола твердой мозговой оболочки, вынуть obturator из спинальной иглы и подождать появления спинальной жидкости в прозрачном павильоне иглы
- \*если спинальная жидкость не появляется, то необходимо с введенным обратно obturatorом поменять глубину постановки иглы
- провести запланированную процедуру, извлечь спинальную иглу
- закрыть место пункции стерильной салфеткой
- обработать и утилизировать иглу в соответствии с установленным порядком

**ВАЖНО:**

- не применять излишние усилия при введении иглы – возможно искривление иглы или поломка
- согнутая игла подлежит замене, выпрямлять ее запрещено
- при ощущении сопротивления при введении иглы или появления боли, следует приостановить манипуляцию и действовать в соответствии с медицинскими показаниями и методиками

**ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:**

- |   |                                 |
|---|---------------------------------|
| - транзиторная неврологическая симптоматика | - постпункционная головная боль |
| - эпидуральная гематома или абсцесс         | - пневмоцефалия                 |
| - нейротоксичность                          | - задержка мочи                 |
| - гипотония                                 | - брадикардия                   |

**ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ:**

- использовать только квалифицированным медицинским персоналом
- для одноразового использования
- не использовать при нарушении целостности упаковки
- срок годности 5 лет с даты изготовления
- хранить при температуре от -30 до +45 С, в прохладном, сухом месте.
- обработка и утилизация иглы в соответствии с установленным порядком



**“ДЛЯ ОДНОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ”**

Изделие следует использовать в стерильных условиях, однократно и для одного пациента. Очистка или повторная стерилизация исключена. Многократное использование одноразовых изделий содержит потенциальные риски для пациента и персонала. Ухудшение свойств материала и нарушение стерильности, вызванное подобным повторным использованием, может привести к заболеванию, травме или смерти пациента.

**СТЕРИЛИЗАЦИЯ:**

- оксид этилена



0044

